

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Antidekubitní sedačku skladujte výhradně v horizontální poloze na suchém a stinném místě (+5 až +40 °C) a nezatěžujte ji vahou v době, kdy nebude používána.

Výrobce garantuje správnou funkčnost a deklarované vlastnosti antidekubitní anatomické sedačky při obvyklém užívání po dobu 36 měsíců. Po uplynutí této lhůty dochází k nenávratným funkčním změnám výrobku a nelze zaručit deklarované vlastnosti této zdravotní pomůcky, proto doporučujeme antidekubitní anatomickou sedačku přestat používat a nahradit ji novým výrobkem, předejdete tak možným následným zdravotním problémům.

Výrobek po uplynutí jeho životnosti zlikvidujte podle platných předpisů nakládání s odpady.

SERVIS A OPRAVY

V případě poškození nebo vyskytnutí závady na sedačce, kontaktujte prodejce. Nepoužívejte poškozenou nebo jinak nefunkční antidekubitní sedačku, nepokoušejte se sedačku opravit!

Výrobce:
KURY spol. s r.o.
Zdechovice 28
533 11 Zdechovice

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky.

Záruka se nevztahuje:

- na poškození vzniklá vlivem nesprávného použití a nesprávnou manipulací s částmi výrobku
- opotřebení, způsobené obvyklým užíváním
- na vady a poškození způsobené neodborným zásahem jiného subjektu

Návod k obsluze



Sedačka antidekubitní GEMINI SPIN VS GEMINI SPIN VSC



Datum vydání: červen 2018

Datum poslední revize návodu: 20. 2. 2020



POPIS

Antidekubitní sedačka GEMINI SPIN VS/VSC je zdravotní pomůcka a je určena primárně k prevenci následků dlouhodobého sezení. Antidekubitní sedačka GEMINI SPIN VS/VSC tvoří ideální komplet pro prevenci tvorby dekubitů a otlaků při dlouhodobém sezení.

Sedačka je tvořena výplní ze speciální odolné viscoelastické pěny s paměťovým efektem. Samotná hmota sedačky má vrchní vrstvu tvořenou sítí tzv. 3D nopů. Viskoelastická pěna postupně měkne vlivem tlaku a tepla lidského těla, v tu chvíli 3D nopy umožňují zcela zásadní zvýšení komfortu sedu rozložením váhy těla uživatele, absorpcí deformací a především umožňují proudění vzduchu v horizontální i vertikální rovině. 3D nopy zároveň eliminují střižné síly a tření způsobené pohybem uživatele na sedačce, čímž zabráňují negativnímu působení tlaku na pokožku a podkožní tkáň. Spodní základnu výplně tvoří tvrzený pěnový polyetylen (PE) se vzduchovými kanálky pro proudění vzduchu. Výplň sedačky je vertikálně perforována s cílem umožnit vertikální proudění vzduchu pro odvod tepla a především vlhkosti z vrchní kontaktní vrstvy. Celý komplet je uložen v potahu z třívrstvé provětrávané tkaniny.

Potah tvoří v sedací části tkanina se **speciální termoregulační složkou Outlast®**. Tato hi-tech technologie poskytuje textilním materiálům „inteligentní“ schopnost proaktivní regulace tělesné teploty (absorpce nebo výdej tepla). Boční část potahu je tvořena 3D prodyšnou tkaninou, **v přední části s úchopem** pro přenášení sedačky a **poutky po obvodu** pro lepší uchopení sedačky např. na zemi. Spodní část potahu sedačky tvoří protiskluzná síťovaná tkanina zabráňující posouvání antidekubitní sedačky po povrchu sedáku (např. vozíku).

Potah sedačky je obecně velmi dobře odolný proti otěru. **POZOR!** Vrchní a boční 3D tkanina na potahu je však velmi náchylná na otřepání při styku se zdrhovadly (suchý zip). **Vyvaruj-**



te se proto přímému kontaktu zdrhovadel s vrchní a boční částí potahu sedačky.

Speciální textilní vrstva Outlast® může tzv. „lehce migrovat“ (otisknout se) na viscoelastickou pěnu vnitřní výplně sedačky. Tento jev je přirozený a nemá žádný vliv na správnou funkci sedačky.

Antidekubitní sedačky GEMINI SPIN se vyrábí ve 2 typech - typ VS a typ VSC. Oba typy se liší profilem sedací části. Typ VS je rovný, typ VSC je konturovaný se zvýrazněnou abdukční funkční částí. Sedačka se vyrábí ve čtyřech variantách tvrdosti použité výplně (viz dále).

Rozměry (šířka a délka) jsou předmětem objednávky uživatele, většinou kopírují rozměry sedu vozíku či zařízení, kde bude použita.

FUNKCE

- **antidekubitní vlastnosti:**
 - prevence vzniku dekubitů
 - prevence vzniku intertriga
- **zabráňuje mechanickému poškození tkání sedacích částí těla**
- umožňuje **rovnoměrné rozložení váhy těla** a správné prokrvení pokožky
- pomáhá **udržovat tělesnou teplotu** v oblasti sedu použitím spec. materiálu Outlast®
- umožňuje **horizontální a vertikální odvětrávání** oblastí sedu

ORIENTAČNÍ TABULKA NOSNOSTI

Sedačka je vyráběna ve 4 nosnostních kategoriích. Pro správnou funkci speciální vrstvy 3D nopů je důležité používat odpovídající hmotnostní kategorii výplně sedačky. Se správným výběrem vám pomůže rehabilitační odborník nebo lékař. Jednotlivé typy nosností jsou označeny vlísem ve výplni:

typ/značka	hmotnost uživatele
A	do 60 kg
B	60–75 kg
C	75–90 kg
D	90–150 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Sedačka je určena k užívání výhradně pro 1 osobu (z hygienických i funkčních důvodů). Před použitím sedačky konzultujte její vhodnost a typ provedení (tvrdost) s ošetřujícím lékařem. Pročtěte si návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte dodavatele.

Správná funkce antidekubitní sedačky je zaručena pro použití v teplotním rozmezí -10 až +40 °C, pokud je obsazena uživatelem. Sedačku nenechávejte dlouhodobě uskladněnou na mrazu nebo přímém slunci!

Nepoužívejte jakkoliv poškozenou sedačku - zkontrolujte potah, protiskluznou vrstvu a pohmatem také vnitřní funkční část. Antidekubitní

sedačku správně a stabilně umístěte na sedačku (např. vozíku) protiskluznou vrstvou dolů. Přesvědčte se, že velikost antidekubitní sedačky odpovídá velikosti sedačky vozíku.

Antidekubitní sedačka není vyrobena z nehořlavého materiálu! Vyvarujte se používání otevřeného ohně v blízkosti sedačky! Dbejte zvýšené opatrnosti při kouření!

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Tak jako všechny exponované části výrobků, také antidekubitní sedačka postupem času podléhá opotřebení a zašpinění, závislých na intenzitě používání.

Menší znečištění:

Sedačku pravidelně zbavujte prachu a usazených nečistot (vyklepáním nebo vysavačem). Při menším uspinění očistěte potah vlhkým hadrem, jemnou houbičkou nebo velmi jemným kartáčem za použití teplé vody, popř. běžného mycího prostředku. Nepoužívejte tvrdé kartáče nebo drátěnky, agresivní a silné dezinfekční přípravky nebo páru! (Před použitím čistícího prostředku si přečtěte pozorně návod konkrétního čistícího přípravku!)

Větší znečištění:

Potah podložky je možné sejmout a následně prát. Perte maximálně na 40 °C a nepoužívejte aviváž. **Potah nežehlete!** Nechte volně proschnout.

Při vyjímání vnitřní výplně z potahu dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození celistvosti výplně či jednotlivých nopů přetržením silou! **Neťahajte silou za hmotu výplně nebo za 3D nopy!**

Výplň sedačky lze opláchnout vlažnou vodou a nechat **důkladně proschnout**.

Nikdy neperte vnitřní částí sedačky (výplň) v pračce!

