

MANUFACTURAS VETTEL, S.L.

UPÍNACÍ PROSTŘEDKY - NÁVOD K POUŽITÍ



Pás fixační DVOUBODOVÝ AD10 - BŘICHO A PÁNEV ÚZKÝ
Pás fixační DVOUBODOVÝ AD11 - BŘICHO
Pás fixační DVOUBODOVÝ AD11E - BŘICHO ÚZKÝ
Pás fixační DVOUBODOVÝ AD12 - BŘICHO A PÁNEV
Pás fixační ČTYŘBODOVÝ AD13 - TRUP
Pás fixační ČTYŘBODOVÝ AD14 - TRUP A PÁNEV
Pás fixační Pás fixační vestička AD18
Pás fixační Pás fixační univerzální ADX18
Pás fixační Pás fixační úzký dvoubodový ADX20
Pás fixační Pás fixační čtyřbodový vesta ADX22
Pás fixační PÁS FIXAČNÍ ČTYŘBODOVÝ ADX23 - VESTA
Pás fixační PÁS FIXAČNÍ ADX30 - FIXACE NOHOU
Pás fixační Pás fixační pro chodidla s patní zarážkou ADX1
Pás fixační Pás fixační kotníkový ADX2
Pás fixační Pás fixační čtyřbodový pro nohy ADX4PE

Výrobce:

MANUFACTURAS VETTEL, S.L.

Distributor pro Českou republiku:

KURY, spol. s r.o.

Zdechovice 28, 533 11 Zdechovice

Tel: 466 936 139 Fax: 466 936 138

E-mail: info@kury.cz www.kury.cz

Pokyny pro užívání

Tento produkt je zařazen jako "Zdravotnický prostředek třídy I" podle SMĚRNICE RADY 93/42 EHS o zdravotnických prostředcích, vyhovuje všem základním požadavkům pro používání těchto produktů a měl by být pro dosažení plné efektivity v terapii a pro bezpečné užívání používán pod lékařským nebo ortopedickým dohledem. Při používání tohoto produktu není v žádném případě ohroženo zdraví uživatele.

Složení materiálů

Materiály použité při výrobě tohoto produktu jsou hypoalergenní. Plochy, které přicházejí do styku s pokožkou, jsou vyrobeny z přírodních vláken.

Výběr velikosti

Výběr velikosti, stejně jako správné umístění produktu, je základem pro efektivní a bezpečné používání a pro odolnost produktu. V balení je orientační tabulka velikostí, pomocí které je odborník schopen vybrat správnou velikost. Je potřeba mít na paměti, že příliš volný popruh může snižovat efektivitu terapie, a příliš těsný popruh může mít negativní vliv na krevní oběh, případně na jiná onemocnění.

Hořlavost

Vzhledem k textilním materiálům, ze kterých je produkt vyroben, nevystavujte produkt přímým zdrojům tepla.

Balení

Balení produktu zaručuje kompletní ochranu před zničením nebo kontaminací během přepravy, uložení nebo užívání. Balení je prováděno v odpovídajícím sanitárním prostředí bez chemických látek a bez přímého slunečního svitu.

Použití

Pro terapeutické účely. Produkt není určen pro opětovné použití jinou osobou.

Změny

Jakákoliv změna původního produktu bez souhlasu výrobce zbavuje výrobce odpovědnosti vyplývající z užívání takto změněného produktu.

Čištění

Prát v teplé vodě do 30°C s přidavkem neutrálního pracího prostředku. Nepoužívat suché čištění ani bělidla.

Sušení

Sušit na rovném povrchu bez přímého slunečního svitu a bez jiných zdrojů tepla.

