


Návlek na obruč silikonový

1. Návleky před použitím vizuálně zkontrolujte, zda-li nejsou mechanicky poškozené.
2. Očistěte obruč od mechanických nečistot, případně odmastěte od potu pomocí mýdlové vody nebo roztokem saponátu.
3. Návlek jednoduše pouze nasadte na obruč zadního kola vozíku - postupně po jejím obvodu (obr. 1).
4. Návlek na obruč **NELEPTE** ani jinak **NEPŘIDĚLÁVEJTE!**
5. Před jízdou zkontrolujte přilnavost návleku - návlek nesmí prokluzovat, popř. znovu očistěte obruč a rovnoměrné nasazení návleku po celém obvodu obruče.
6. V případě potřeby návleky sundejte jednoduše přetažením přes obruč (obr. 2).

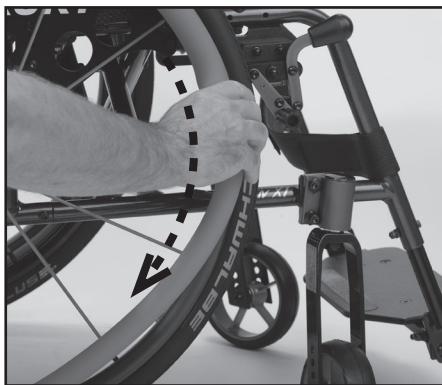

obr. 1



obr. 2

Údržba:

Návleky nevyžadují speciální údržbu - udržujte je však čisté, odstraňujte z nich mechanické nečistoty.

Návleky lze omýt běžnými neagresivními čisticími prostředky.

Mechanicky poškozený návlek **NEPOUŽÍVEJTE!** Může dojít k poranění rukou.

Návleky jsou vyrobeny ze speciální silikonové hmoty a jsou zdravotně nezávadné.

Záruka:

24 měsíců od data prodeje

Prodeje:

KURY spol. s r.o., Zdechovice 28, 533 11
tel. 636 936 139, e-mail: info@kury.cz

Výrobce:

Recomed S.C, Paderewskiego 3B
59-400 Jawor, Poland

Datum vydání: 11/2018

Datum poslední revize návodu: 20. 11. 2018

KURY